

PROCEDURE PRELEVEMENT QUANTIFERON

1-TUBES

Deux (2) tubes avec héparine de lithium (HL, bouchon vert) :

Une fois le prélèvement réalisé, les tubes doivent être mis à +2°C/+8°C, **dans les 3 heures**, et doivent être transportés **dans les 48 heures** (maximum) au laboratoire du CHPf.



2-PRELEVEMENT

Bon de renseignement ci-joint à joindre au prélèvement.

Les renseignements sur l'heure de prélèvement et les conditions de conservation/transport sont

OBLIGATOIRES

2 tubes HL

Procédure de pré-analytique :

- 1) **Etiqueter** les 2 tubes HL
- 2) **Recueillir du sang veineux** jusqu'au trait noir indiqué sur les 2 tubes HL (2 x 4ml)
« Si une aiguille papillon est utilisée, un tube de purge doit être utilisé pour remplir la tubulure. »
- 3) **Homogénéiser par retournement** (5/7 fois)
- 4) **Mettre à +2°C / +8°C le plus rapidement possible (délai maximum : 3 heures)**
- 5) **Transférer les tubes à +2°C/+8°C, le bon renseigné au laboratoire du CHPf directement ou via un laboratoire tiers.**

Les dépôts de prélèvements doivent avoir lieu au CHPf avant 14h30, du lundi au jeudi

Les renseignements pré-analytiques seront saisis et édités sur le compte-rendu d'examen. Leur absence entrainera une non-conformité.

Laboratoire de Biologie Médicale et d'anatomopathologie, CHPf

☎ : 40 48 59 56

Test QUANTIFERON®

Détection in vitro de la production de l'interféron
après stimulation par des antigènes spécifiques de MTB

Patient (à compléter ou coller une étiquette)

Prescripteur (nom et signature)

Nom

Prénom

Nom marital

Date naissance

Indication (case à cocher) :

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Enquête autour d'un cas index | <input type="checkbox"/> Avant mise sous traitement anti-TNF |
| <input type="checkbox"/> Enfant < 15 ans | <input type="checkbox"/> Patient VIH, bilan initial |
| <input type="checkbox"/> Personnel professionnellement exposé, à l'embauche | |
| <input type="checkbox"/> Autre, préciser : | |

Date de la dernière IDR si < 3 mois :

Date / Heure de prélèvement	----/----/----	à	----h----
Nombre de tubes prélevés	----		(attendu : 2 tubes HL)
Conditions de transport	<input type="checkbox"/> T° ambiante		<input type="checkbox"/> Réfrigéré
Nombre de tubes reçus	----		(attendu : 2 tubes HL)
Date / Heure de réception au laboratoire	----/----/----	à	----h----
Date / Heure de mise en incubation	----/----/----	à	----h----

